

Gamme Ultracision Harmonic™

Ciseaux Harmonic® 1100

Conçus pour fournir une vitesse de coupe rapide, une température maximale de la lame maîtrisée et une capacité de dissection précise.^{15-19*}



Algorithme optimisé qui contrôle activement la chaleur de la lame -- **pour une température maximale de la lame plus réduite.**¹⁷



Vitesse de transsection 35 % plus rapide -- **pour une exposition plus courte des tissus à la chaleur que les ciseaux HARMONIC ACE®+7** grâce à l'hémostase avancée.¹⁸



Pointe courbée et effilée -- **pour une dissection plus précise que les ciseaux HARMONIC ACE®+7.**¹⁹

	HARMONIC ACE®+7	HARMONIC® HD 1000i	HARMONIC ®1100
Un scellement optimisé ²⁰	●	●	●
Une vitesse de coupe plus rapide ¹⁸		●	●
Une meilleure protection des tissus ¹⁶			●

Ciseaux Harmonic® 1100

Equipés d'un algorithme amélioré de technologie tissulaire adaptative qui contrôle en permanence la chaleur de la lame pour réduire la température maximale de l'instrument.¹⁷

Les ciseaux **HARMONIC® 1100** ont une température maximale de la lame inférieure à celle de l'**ACE+7**.¹⁷


- La température de la lame est maintenue lorsqu'une activation prolongée est nécessaire.¹⁷
- La durée de vie du mors de préhension est améliorée pour une utilisation optimisée continue tout au long de la procédure.²¹

Réduction de l'exposition des tissus à la chaleur grâce à une vitesse de transection 35% plus rapide que **ACE+7**.¹⁸

- Le bouton vert est conçu pour fournir un scellement optimisé du bouton **MIN** avec la vitesse de coupe du bouton **MAX** de l'**ACE+7**.¹⁸

Les ciseaux HARMONIC® 1100

- Ont une température maximale de la lame inférieure à l'**ACE+7**.¹⁷

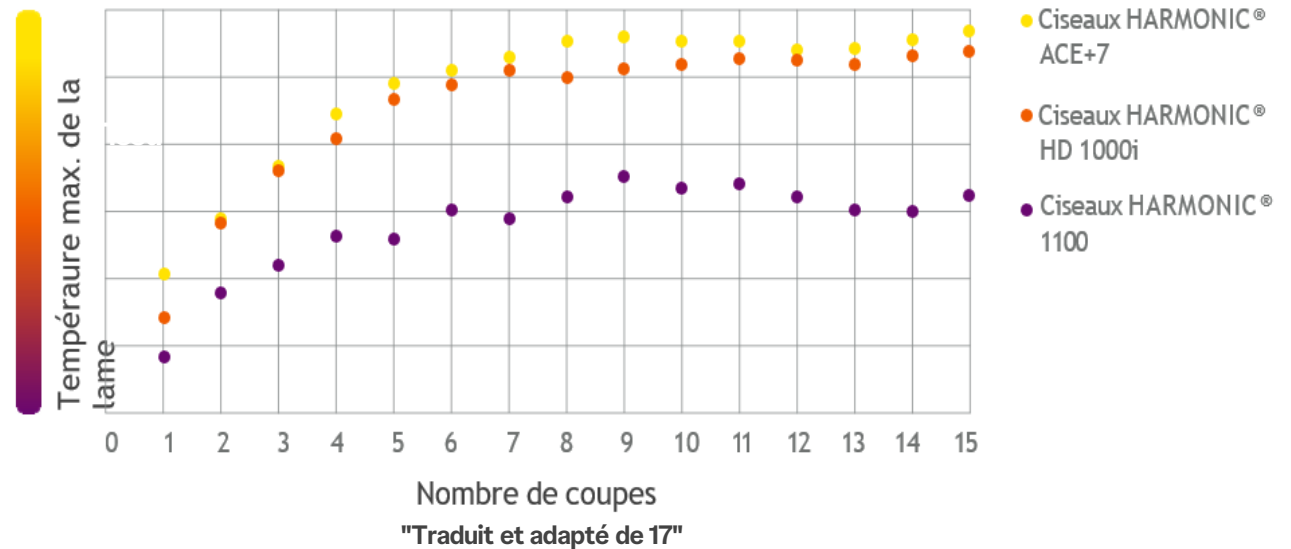


Ciseaux Harmonic® 1100

Dissection plus précise grâce à la lame courbe et effilée.^{15,19}

- La lame courbe et effilée permet **une dissection plus précise qu' HARMONIC® ACE+7.**¹⁹
- Avec une conception unique de la lame, **les ciseaux HARMONIC® 1100 délivrent des scellements sécurisés.**^{15,20,19}

Différences de profil des mors:

Ciseaux HARMONIC® 1100 vs Ciseaux HARMONIC® ACE+7

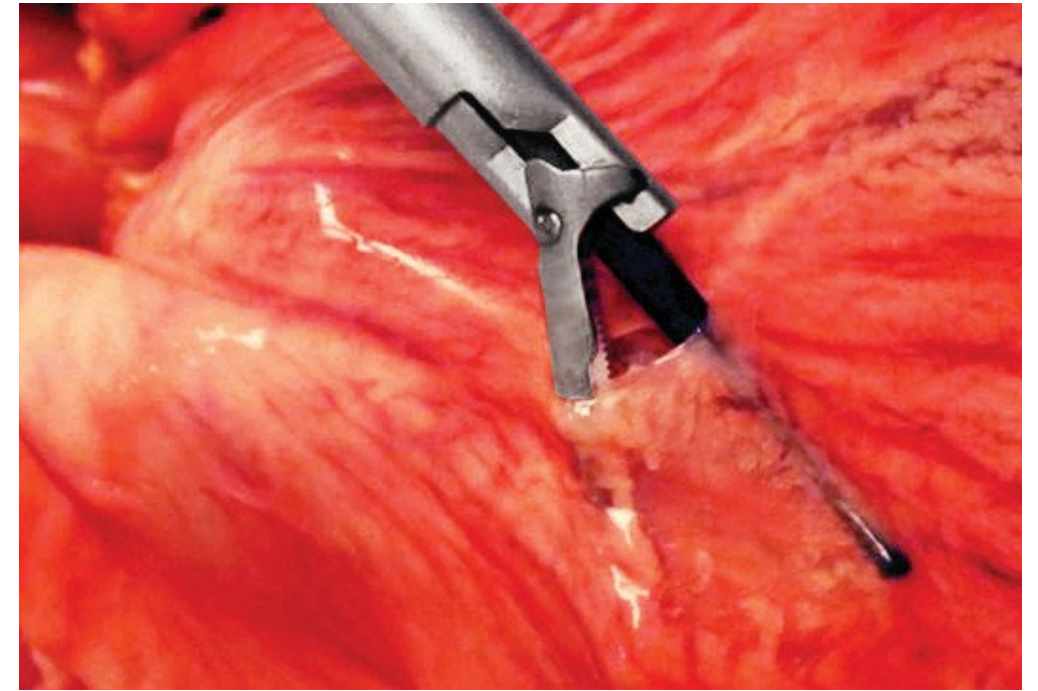

Précision optimisée.¹⁹

Mors plus effilés, conçus pour permettre un accès plus précis aux tissus.¹⁹

La gamme des ciseaux HARMONIC® 1100 est conçue pour offrir **une vitesse de coupe rapide, une température de la lame maximale maîtrisée et des capacités de dissection précises.**¹⁵⁻¹⁹



Code du produit	Description	Quantité/Unité de vente
HAR1120	Ciseaux HARMONIC® 1100, 20 cm longueur	6
HAR1136	Ciseaux HARMONIC® 1100, 36 cm longueur	6

Tableau récapitulatif - HARH

Code du produit	Description	Quantité/Unité de vente
HARH23	Ciseaux HARMONIC® ACE®+7, 23 cm longueur	6
HARH36	Ciseaux HARMONIC® ACE®+7, 36 cm longueur	6
HARH45	Ciseaux HARMONIC® ACE®+7, 45 cm longueur	6



◀ Ciseaux Harmonic ACE®+7 ▶

Gamme Thermofusion ENSEAL X1™

ENSEAL® X1



ENSEAL® X1 MORS COURBES

ENSEAL® X1 MORS DROITS

ENSEAL® X1 GRAND MORS

ENSEAL X1

Etapes d'utilisations




- Conçue pour une utilisation facilitée et intuitive

Fonctions séparées :

"coaguler" et "couper"


Fonctionnalités supplémentaires

- Coaguler **SANS** couper
(point de coagulation)
- Couper **SANS** coaguler
(ciseaux)

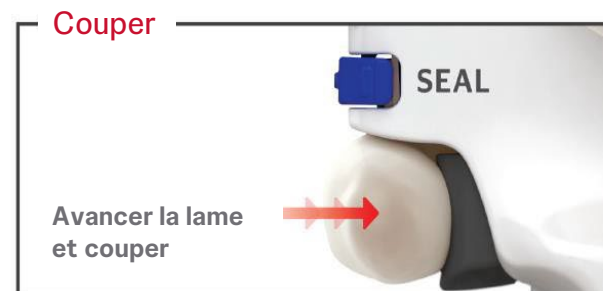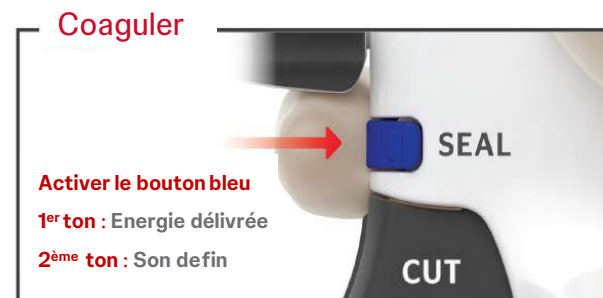
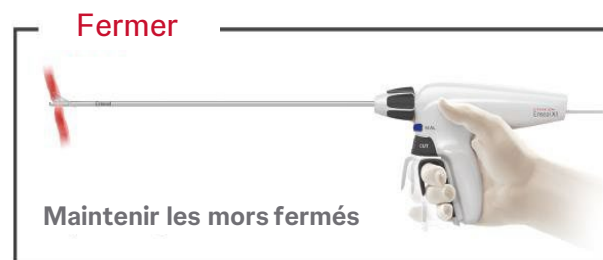


ENSEAL® X1 Mors Courbes

Caractéristiques du dispositif ENSEAL® X1 Mors Courbes

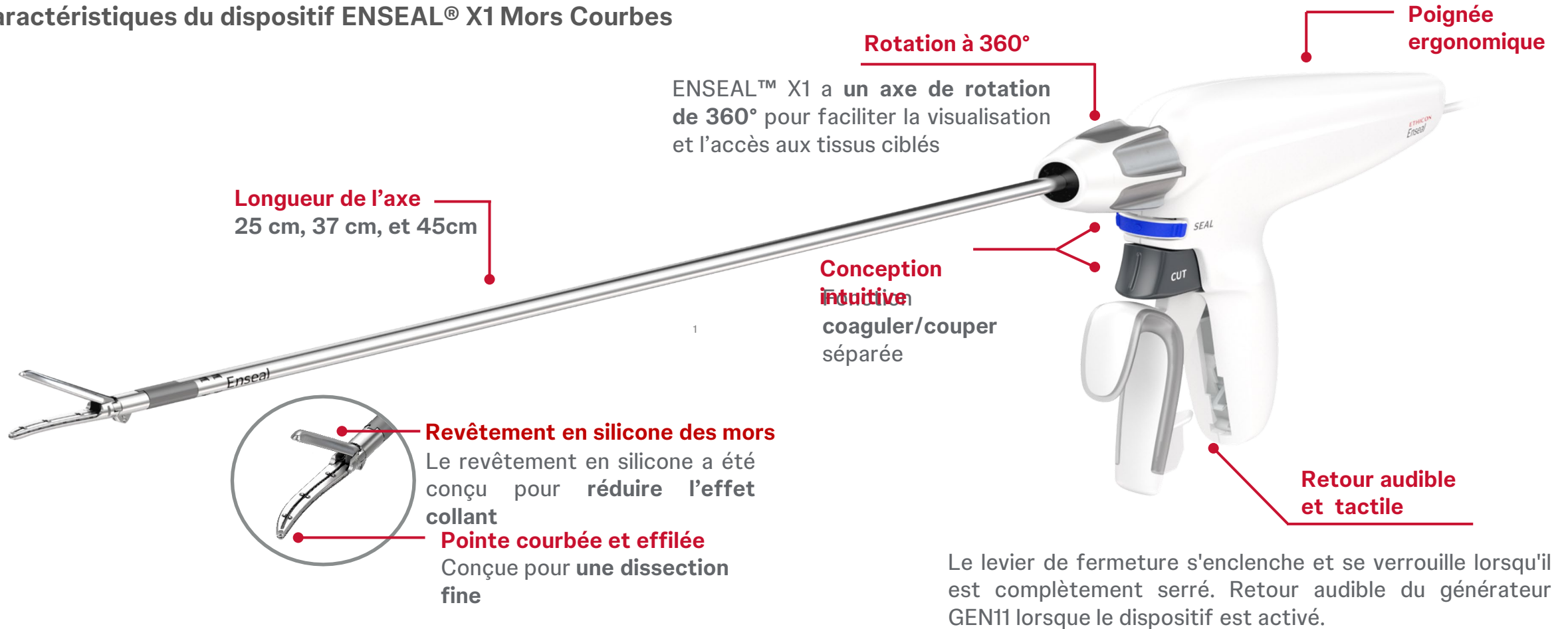

ENSEAL® X1 Mors Courbes

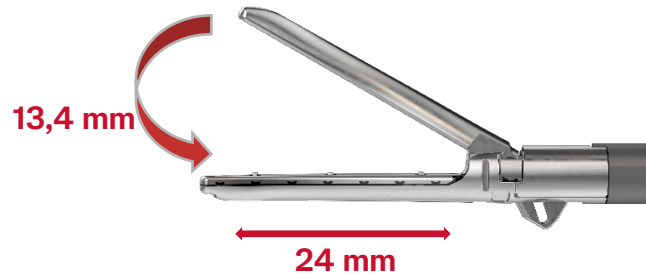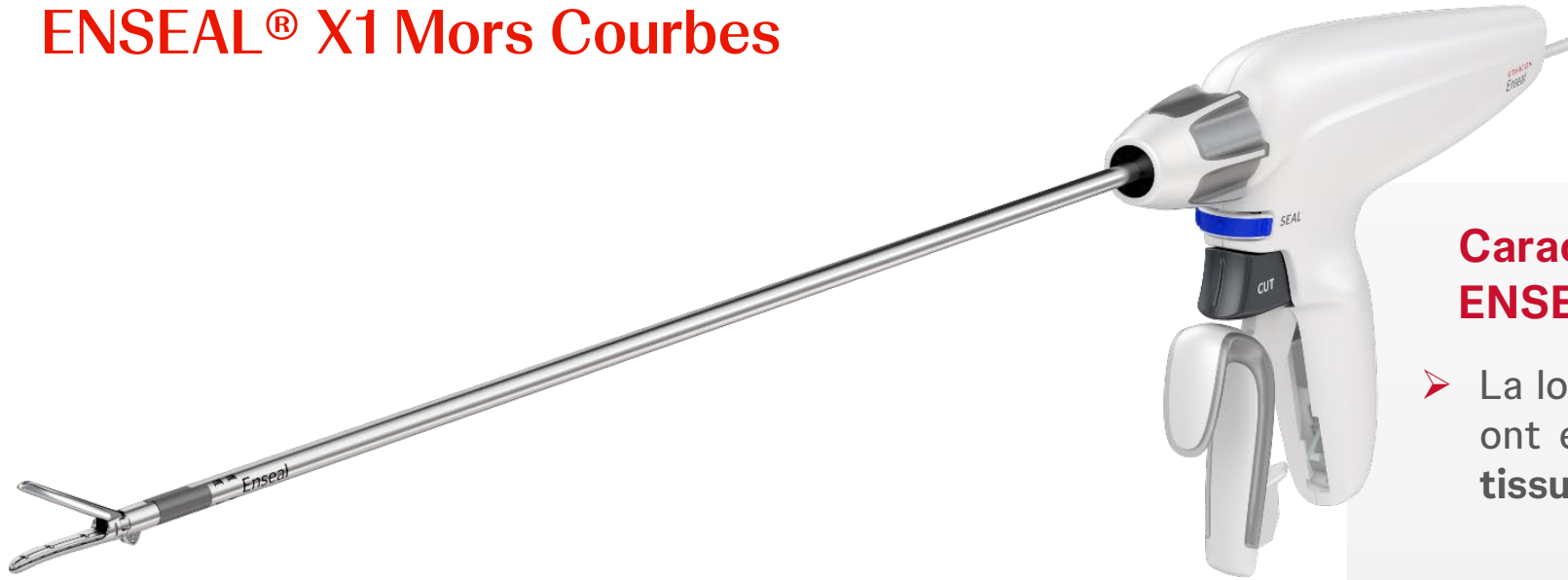

Caractéristiques du dispositif ENSEAL® X1 Mors Courbes



- La longueur des mors et la largeur de l'ouverture ont été conçues pour optimiser la **capture des tissus**.
- **Pointe courbée et effilée** conçue pour une dissection fine.
- Enseal X1 a un axe de rotation de 360°.


ENSEAL® X1 Mors Courbes



Scellement des vaisseaux

Scellement optimisé

- ENSEAL® X1 Mors Courbes peut sceller des vaisseaux jusqu'à 7mm incluant les faisceaux vasculaires dont la longueur est adaptée aux mors de l'instrument.

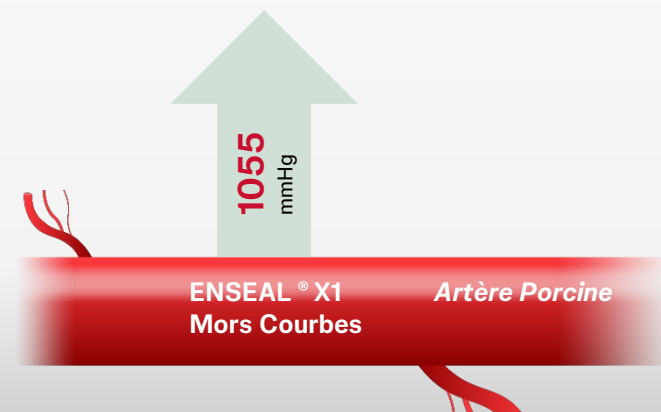

ENSEAL® X1 Mors Courbes

Code du produit	Description	Quantité/Unité de vente
NSLX125C	Ciseaux ENSEAL® X1 Mors Courbes, 25 cm longueur	3
NSLX137C	Ciseaux ENSEAL® X1 Mors Courbes, 37 cm longueur	3
NSLX145C	Ciseaux ENSEAL® X1 Mors Courbes, 45 cm longueur	3

